

## Fragenkatalog TopiCare

<p><b>Wie funktioniert TopiCare?</b></p>	<p><b>Vorstellen muss man sich das so:</b> Wunden benötigen für ihre Heilung Sauerstoff. Sie haben bei chronischen Wunden eine verminderte Sauerstoffversorgung im Gewebe. Dadurch heilen die Wunden nicht. Bei O2-TopiCare wird Sauerstoff von einer Sauerstoffquelle z.B. einem Sauerstoffkonzentrator oder einer Sauerstoffleitung im Krankenhaus in einen <b>transparenten Beutel</b> geleitet. Der eingeleitete Sauerstoff füllt den Beutel auf und es entsteht ein Druck. Anhand dieses <b>Druckes</b> wird der Sauerstoff regelrecht in die Wunde gedrückt. So gelangt er von außen direkt in das Gewebe und die Wunde verfügt wieder über genügend Sauerstoff für die Wundheilung.</p>
<p><b>Für welche Wunden ist O2-TopiCare geeignet?</b></p>	<p>Für schwer heilende Wunden z.B. <b>chronische Wunden</b> wie diabetisches Fußsyndrom, Ulcus Cruris, Brandwunden</p>
<p><b>Zahlt das meine Krankenkasse?</b></p>	<p>Wir haben bereits einige Versorgungen durch die Krankenkassen übernommen bekommen. Grundsätzlich ist TopiCare noch nicht so bekannt und somit eine <b>Individualentscheidung/Einzelfallentscheidung</b>. Wir als Dienstleister übermitteln Ihre Verordnung an Ihre Krankenkasse und stehen dem Arzt und der Krankenkasse für weitere Fragen hilfreich zur Verfügung.</p>

<p><b>Was ist das A-V-Impulse System?</b></p>	<p>Hierbei handelt es sich um ein zusätzliches Gerät, welches wir mit unserem TopiCare System kombinieren um die Wundheilung stärker zu fördern. Der Anschluss erfolgt mittels intergrierter Anschlüsse in dem Sauerstoffsack. Bei der Anwendung trägt der Patient sogenannte Fußmanschetten. In diesen Fußmanschetten ist eine Art Luftkammer. Das Gerät gibt in einstellbaren Zeitabständen Impulse ab. Die Luftkammern füllen sich dann mit Luft. Dies imitiert die <b>natürliche Gehbewegung</b> indem es dem Fußvenenplexus betätigt. Sauerstoffarmes Blut wird somit aus dem Bein ausgepumpt, neues Blut kann nachfließen.</p> <p>Das A-V- Impulse System ist im Lieferumfang enthalten – Der Arzt entscheidet aber, ob es genutzt werden soll oder nicht.</p>
<p><b>Was kostet TopiCare, wenn meine Kasse nicht zahlt?</b></p>	<p>Der Preis für den <b>ersten Monat beträgt 2.255,05 € inkl. MwSt.</b> Inklusive ist ein Sauerstoffkonzentrator, 4 O2-TopiCare Wundmanschetten, 1 A-V-Impulsegerät, 1 paar A-V-Impulsmanschetten, 1 Nasenbrille.</p> <p>Für den darauf folgenden Monat erhalten Sie dann 4 O2-TopiCare Wundmanschetten für 1.187,62 € inkl. MwSt. Eine einzelne Manschette kostet <b>351,05 € inkl. MwSt.</b></p>
<p><b>Wie oft muss ich die Manschetten wechseln?</b></p>	<p>Die O2-TopiCare Wundmanschette kann bis zu <b>10 Tage</b> angewendet werden. Danach bitte austauschen. Sollten Auffälligkeiten am Material auftreten muss die Manschette eher gewechselt werden.</p>
<p><b>Wie reinige ich O2-TopiCare?</b></p>	<p>Die Reinigung sollte mit milder <b>Seifenlauge</b> erfolgen.</p> <p>Ein <b>Desinfektionsspray ohne Alkohole</b> kann auch genutzt werden, um in die Ecken des Beutels zu gelangen.</p>

<b>Worauf muss ich besonders achten?</b>	<p>1. <b>Sauerstoff ist brandfördernd</b> und kann mit fettigen Ölen und Salben reagieren. Deshalb sollte die Wunde vorher <b>gereinigt werden</b> und es sollten <b>keine weiteren Salben</b> aufgebracht sein.</p> <p>2. Die Behandlung sollte <b>regelmäßig</b> von einem Arzt <b>kontrolliert</b> werden.</p>
<b>Kann ich Pflaster benutzen?</b>	<p><b>Ja</b>, Pflaster können genutzt werden. Sie müssen <b>Sauerstoffdurchlässig</b> sein z.B. für nässende Wunden Mullverband.</p>
<b>Wie lange dauert die Anwendung?</b>	<p>Dies muss der Arzt entscheiden. Wir empfehlen eine <b>60 bis 90 minütige Anwendung am Tag</b>.</p> <p>Anwendungsbeobachtungen haben gute Ergebnisse erzielt mit einer solchen täglichen Anwendungszeit. Dies führte dazu, dass bereits <b>nach 2 Wochen</b> erste Erfolge bei der Wundheilung zu sehen waren. Mindestens <b>4 Wochen</b> sollte es aber angewendet werden.</p>
<b>Gibt es verschieden Größen?</b>	<p><b>Nein</b> der Beutel ist für alle Patienten gleich groß. Falls zusätzlich <b>die A-V Impluse-Manschette</b> genutzt wird – wird die anhand Ihrer <b>Schuhgröße</b> geliefert.</p>
<b>Wie lege ich das System an?</b>	<p>Das O2-TopiCare System wird über das komplette Bein gezogen. Oben am Bein wird das System mit einem mitgelieferten speziellen <b>Dichtungsband</b> verschlossen. Zusätzliche Fixierung kann über ein mitgeliefertes Klettband vorgenommen werden. In der Regel sollte das Anlegen von einer <b>zweiten</b> Person vorgenommen werden.</p>
<b>Kann ich das System auch am Arm nutzen?</b>	<p><b>Ja</b></p>
<b>Welche Nebenwirkungen sind bekannt?</b>	<p>Bis zum heutigen Tag sind <b>keine Nebenwirkungen</b> bekannt. Es ist nur bei bekannten <b>Allergien</b> gegen <b>Bestandteile</b> des Produktes nicht anzuwenden z.B. Latex</p>

<b>Brauche ich eine zusätzliche Behandlung?</b>	Ja, O2-TopiCare ist eine Behandlung, die zusätzlich zu Ihrer normalen Wundbehandlung durchgeführt werden kann.
<b>Wer kann O2-TopiCare verschreiben?</b>	Ihr behandelnder Arzt